

INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKİ ŚLINY

1. Informacje wstępne

Niniejsza instrukcja określa zakres czynności mających na celu samodzielne pobranie próbki śliny przez pacjenta. Pobrany w ten sposób materiał zostanie wykorzystany do wyizolowania i wykrycia antygenu wirusowego.

2. Skład zestawu przeznaczonego do pobierania wymazu

- ustnik - 1 szt.
- pojemniczek – 1szt
- rękawiczki jednorazowe - 2 szt.
- instrukcja pobrania próbki – 1 szt.
- formularz zlecenia badania - 1 szt.
- formularz oświadczenie pacjenta – 1szt.
- woreczek strunowy do zabezpieczenia pojemniczka - 1 szt.
- pudełko styropianowe – 1szt.
- chłodziki – 2szt.
- instrukcja odbioru wyniku badania

3. Przygotowanie do pobrania

1) Próbkę należy pobrać zaraz po obudzeniu. Przed pobraniem próbki pacjent nie powinien mieć nic w ustach w tym jedzenia, picia, gumy do żucia, tytoniu. Pacjent przed pobraniem nie powinien myć zębów.

2) Czynności wstępne:

- wypełnić „formularz zlecenia badania”
- kilka godzin przed pobraniem dostarczony chłodzik umieścić w zamrażarce

4. Pobranie próbki

1) założyć rękawiczki jednorazowego użytku



2) podpisać pojemniczek imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia pacjenta oraz datą pobrania materiału



3) wyjąć ustnik, przyłączyć go do pojemniczka.




4) należy zakaszczyć głęboko 3-5 razy aby uwolnić plwocinę z głębokiego gardła do jamy ustnej.

5) wypluć plwocinę do pojemniczka przez ustnik



6) odłączyć ustnik od pojemniczka i wyrzucić do pojemnika na odpady gospodarcze. Pojemniczek zakręcić

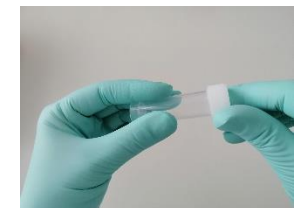

7) pojemniczek umieścić w woreczku strunowym, całość umieścić w pudełku styropianowym wraz z przygotowanym wcześniej chłodzikiem



8) zdjąć i wyrzucić rękawiczki do pojemnika na odpady gospodarcze

9) pudełko styropianowe, zawierające pojemniczek z pobranym materiałem umieścić w dostarczonym kartoniku

10) wypełnione formularze umieścić w dostarczonym kartoniku

5. Dostarczenie materiału

Uwaga! Pobrany materiał do badań należy dostarczyć niezwłocznie w przeciągu 2 h do siedziby laboratorium, **ul. Nizinna 12, 04-362 Warszawa**, w godzinach pracy laboratorium (8:00-16:00).



BORLAMED
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
ul. Nizinna 12
04-362 Warszawa
NIP: 1131159925
REGON: 384906183

e-mail:
laboratorium@borlamed.pl
tel.: +48 536 947 487
+48 536 630 468
www.borlamed.pl