

## INSTRUKCJA POBRANIA NASIENIA

### 1. Informacje wstępne

Niniejsza instrukcja określa zakres czynności mających na celu samodzielne pobranie próbki nasienia. Pobrany w ten sposób materiał zostanie wykorzystany do izolacji i wykrycia materiału genetycznego patogenu.

### 2. Skład zestawu przeznaczonego do pobierania wymazu

- sterylny pojemniczek na nasienie z żółtą nakrętką - 1 szt.
- pipetka – 1 szt.
- probówka transportowa z podłożem – 1szt.
- rękawiczki jednorazowe - 2 szt.
- instrukcja pobrania nasienia – 1 szt.
- formularz zlecenia badania - 1 szt.
- woreczek strunowy z oznaczeniem „biohazard” do zabezpieczenia probówki - 1 szt.
- pudełko styropianowe – 1 szt.
- wkłady chłodzące – 2 szt.
- koperta bąbelkowa - 1 szt.
- instrukcja odbioru wyniku badania

### 3. Przygotowanie do pobrania

- 1) Przez okres 24 godzin przed pobraniem wymazu należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno - pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych;
- 2) Przez okres 48 godzin przed pobraniem wymazu nie należy stosować żadnych leków lub maści zewnętrznych. Obecność substancji chemicznych może uniemożliwić przeprowadzenie reakcji PCR i w efekcie uniemożliwić uzyskanie informacyjnego wyniku
- 3) Czynności wstępne:
  - *wypełnić „formularz zlecenia badania”*

## 4. Pobranie nasienia

1) Założyć rękawiczki jednorazowego użytku.



2) Podpisać probówkę transportową imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL lub datą urodzenia pacjenta oraz datą pobrania materiału.



3) Do pojemniczka z czerwoną nakrętką należy pobrać nasienie.



4) Otworzyć probówkę zawierającą podłoże transportowe i przy użyciu pipetki przenieść nasienie z pojemniczka z czerwoną nakrętką do próbki transportowej.



5) Probówkę należy szczelnie zamknąć, a następnie umieścić w woreczku strunowym.



6) Zdjąć i wyrzucić rękawiczki do pojemnika na odpady gospodarcze.

## 5. Wysyłka materiału

Uwaga! Dopuszcza się przechowywanie pobranego materiału w lodówce (temp. 2-8°C), do 48 godzin przed wysłaniem go do placówki BORLAMED.

- 1) Woreczek strunowy z uprzednio pobranym materiałem umieścić w pudełku styropianowym.
- 2) Pudełko styropianowe należy uzupełnić zmrożonymi wkładami chłodzącymi.



- 3) Pudełko styropianowe należy umieścić w dostarczonym kartoniku.
- 4) Wypełniony formularz zlecenia badania umieścić w dostarczonym kartoniku.
- 5) Pudełko styropianowe z pobranym materiałem do badań oraz wypełnionymi formularzami umieścić w kopercie bąbelkowej lub worku foliowym na którym należy nakleić list przewozowy.
- 6) Ustalić termin odbioru przesyłki przez kierowcę lub kuriera – w tym celu należy się skontaktować mailowo lub telefonicznie z pracownikiem BORLAMED.

**tel. 536 947 487 lub 534 630 468**

**e-mail: [laboratorium@borlamed.pl](mailto:laboratorium@borlamed.pl)**

Materiał do badań można również dostarczyć osobiście w godzinach pracy laboratorium (8:00-16:00), **ul. Nasturcjowa 6, 03-989 Warszawa.**



**BORLAMED**  
TWOJE LABORATORIUM

BORLAMED  
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne  
ul. Nasturcjowa 6  
03-989 Warszawa  
NIP: 1131159925  
REGON: 384906183

**e-mail:**  
[laboratorium@borlamed.pl](mailto:laboratorium@borlamed.pl)  
**tel.:** +48 536 947 487  
+48 536 630 468  
[www.borlamed.pl](http://www.borlamed.pl)